

Handleiding en installatie GLUCOFACTS® DELUXE




Indien u de nieuwste versie Java al op uw computer heeft, dan kunt u deze stap overslaan. Voordat het programma geïnstalleerd kan worden, moet Java op de computer geïnstalleerd zijn. Java is gratis te downloaden op www.java.com




- Ga naar: www.diabetes.ascensia.nl
- Kies: Producten
- Kies: GLUCOFACTS® DELUXE
- Download de Driver* van de blauwe USB datakabel en download vervolgens de laatste versie van GLUCOFACTS® DELUXE

* Indien u gebruik maakt van de Contour® NEXT USB bloedglucosemeter is het downloaden van de Driver voor u niet van toepassing.

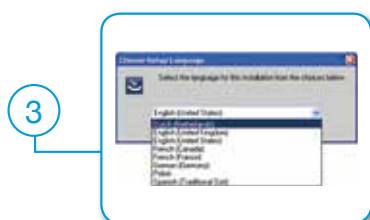

- Dubbelklik op het bestand dat u heeft gedownload.
- Kies de gewenste taal en klik op volgende.

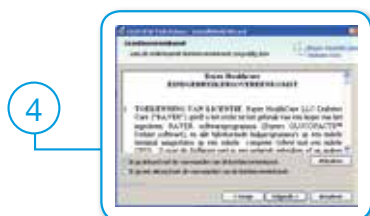

- Lees de voorwaarden en indien u akkoord bent klikt u op: "Ik ga akkoord..." en vervolgens op "volgende".
- Klik hierna op "voltoeien" om de installatie af te ronden.



Het programma is nu succesvol geïnstalleerd.