




Gebruikt uitsluitend
CONTOUR®NEXT-
bloedglucosestrips




Abgebeeld is de MiniMed™ 670G-pomp



Instructies voor het instellen van een draadloze verbinding

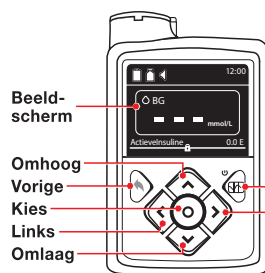

Beeld-
scherm
Omhoog
Vorige
Kies
Links
Omlaag
Grafiek
Rechts

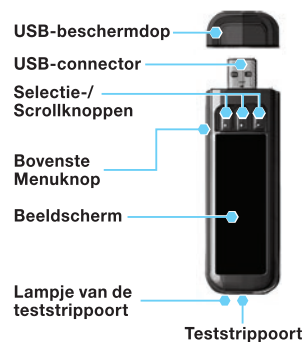

USB-bescherm
dop
USB-connector
Selectie-/
Scrollknoppen
Bovenste
Menuknop
Beeldscherm
Lampje van de
teststrippoot
Teststrippoot

OPMERKING: Controleer de meeteenheden van uw meter.
Voor volledige instructies kunt u de handleiding van uw
meter raadplegen.

De CONTOUR®NEXT LINK 2.4-meter aansluiten op de MiniMed™ 670G-insulinepomp

De meter opladen

- 1** Verwijder de USB-dop om de USB-connector te zien.




De CONTOUR®NEXT LINK 2.4-meter heeft een permanente oplaadbare batterij. Laad uw meter op met de stopcontactlader of door de USB-connector op een computer aan te sluiten. Zorg ervoor dat de computer aan staat. Uw meter zal kort "Niet testen-Batterij laadt op" tonen en het lampje van de teststrippoot zal fllikkeren. **U kunt geen bloedglucosetest uitvoeren terwijl de batterij wordt opgeladen.** Wanneer het opladen klaar is zal het lampje van de teststrippoot uitgaan. Ontkoppel uw CONTOUR NEXT LINK 2.4-meter om te testen.

Koppel de meter los van de oplaadbron alvorens te beginnen met de instelling

- 2** Om met het instellen te beginnen, houdt u de Menuknop op de bovenkant een paar seconden ingedrukt tot de meter wordt ingeschakeld.



- 3** Scroll naar beneden om uw taal te selecteren. Druk op **OK**.

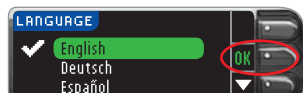


- 4** Druk op **OK** als de juiste taal wordt getoond. Druk op **NEE** als de verkeerde taal wordt weergegeven.

Aansluiten op de pomp

- 5** **Verbinding maken met een MiniMed Pomp?** Druk op **OK**.



- 6** Druk op **OK**. Leg de meter neer en pak uw pomp op.

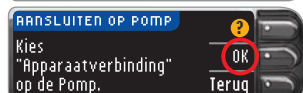

- 7** Druk op de knop **Kies**. Scroll met de pijlknop **Omlaag** naar **Opties**. Druk op de knop **Kies**.



Als het scherm van de pomp uit gaat, drukt u op een van de knoppen om het weer in te schakelen.

- 8** Druk op de pijlknop **Omlaag** om naar **Extra's** te scrollen. Druk op de knop **Kies**.



Gebruik in het menu Extra's de pijl **omlaag** om naar **Apparaatopties** te scrollen. Druk op de knop **Kies**.


- 9** Scroll in het menu **Apparaatopties** naar **Apparaatverbinding**. Druk op de knop **Kies**.



- 10** Plaats de meter en de pomp naast elkaar. Selecteer **Automatisch verbinden** op uw pomp.



Selecteer **Automatisch verbinden** op uw meter.

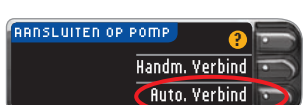

- 11** Lees het scherm van de pomp en gebruik de pijl omlaag om naar de volgende pagina te scrollen.

Gebruik de pijlknoppen om naar **Doorgaan** te scrollen. Druk op de knop **Kies**.



- 12** Plaats de meter en de pomp naast elkaar. Selecteer **Zoeken** op de pomp.

Selecteer **zoek** op de meter.


Het zoeken kan tot 2 minuten duren.




- 13** Controleer of het **Apparaat SN** (serienummer) op de **pomp** overeenkomt met het serienummer op de **meter**. Als ze met elkaar overeenkomen scrollt u naar **Bevestigen** op de pomp. Druk op de knop **Kies**.

Als de pomp verbinding maakt met de meter, verandert het serienummer op het scherm van de **meter** in een ander serienummer. Dit nummer is het serienummer van de **pomp**.

- 14** Keer de pomp om. Controleer of het serienummer op de achterkant van de **pomp** overeenkomt met het pompserienummer dat nu wordt weergegeven op het scherm van de **meter**. Druk op **Volgende**.

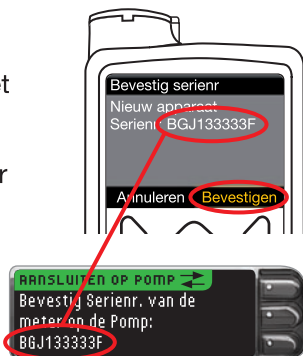


- 15** Selecteer **Altijd** en druk op **OK** op het volgende scherm.

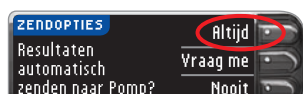


- 16** Selecteer de **Datum Notatie**.



- 17** Druk op **OK**. *Opmerking: Als de tijd en datum niet juist zijn, moet u deze op de pomp wijzigen.*

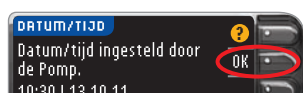


- 18** Druk op **Accepteren** om **AutoLog Uit** te selecteren. *Met AutoLog kunt u een testresultaat markeren als Nuchter, Voor Eten of Na Eten. Raadpleeg uw handleiding om meer te weten te komen.*

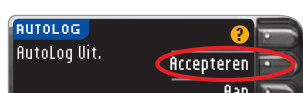

19 Accepteren of Wijzig Signalen Hoge en Lage Grens.

De meter waarschuwt u met een geluid wanneer uw bloedglucoseniveau hoger of lager dan de ingestelde niveaus is.

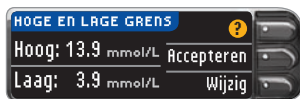


20 Accepteren of Wijzig uw doelwaardenbereik.

Het doelwaardenbereik is uw doel voor uw bloedglucosetestresultaten.



OPMERKING: De alarmsignalen kunnen alleen buiten uw gekozen doelwaardenbereik(en) worden ingesteld. De doelwaarden kunnen alleen binnen uw gekozen waarschuwniveau(s) worden ingesteld. Voor aanvullende informatie kunt u contact opnemen met de Klantenservice. Zie hieronder de contactgegevens van de Klantenservice.

21 Uw systeem is nu ingesteld en klaar om een bloedglucosetest uit te voeren.

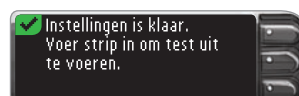

Zie uw CONTOUR NEXT LINK 2.4 handleiding, de bijsluiters van het prikapparaat en de handleiding van de MiniMedinsulinepomp voor volledige instructies.

De openingstijden van de klantenservice kunt u vinden op www.diabetes.ascensia.com

Tel: 0800 235 22 937

IVD Bestemd voor in-vitro diagnostisch gebruik

Lokale vertegenwoordiger:
Ascensia Diabetes Care Netherlands B.V.
Vermogenweg 107
3641 SR Mijdrecht
Nederland
Tel: 0800 235 22 937
info@diabetes.ascensia.nl
www.diabetes.ascensia.com

 Ascensia Diabetes Care Holdings AG
Peter Merian-Strasse 90
4052 Basel, Switzerland


2797

 **ASCENSIA**
Diabetes Care

Medtronic

Zie www.patents.ascensia.com voor informatie over octrooien en hieraan gerelateerde licenties.

Ascensia, het Ascensia Diabetes Care-logo, Clinilog, Contour, Glucofacts en het No Coding-logo zijn handelsmerken en/of gedeponeerde handelsmerken van Ascensia Diabetes Care Holdings AG.

Medtronic, het Medtronic-logo en MiniMed zijn handelsmerken van Medtronic.

© 2017 Ascensia Diabetes Care Holdings AG. Alle rechten voorbehouden.